



S9™ Serie


Anleitung zum Ablesen der Betriebsstunden

Zur S9 Serie gehören die folgenden Therapiegeräte:

S9 AutoSet™, S9 Elite™, Auto 25, VPAP™ S, VPAP™ ST, AutoSet CST™

1

Schalten Sie Ihr Atemtherapiegerät wie gewohnt ein.
Im Ausgangsbildschirm steht STARTSEITE in der obersten Zeile.

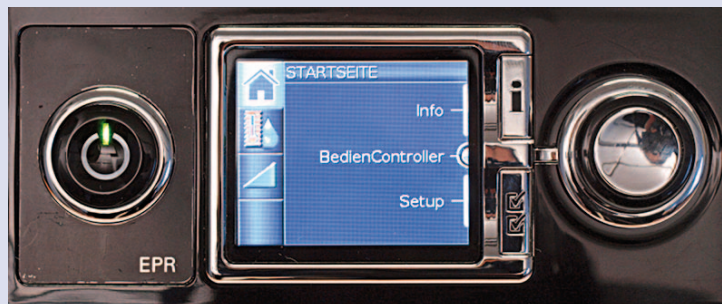

2

Drücken Sie kurz auf die i-Taste und drehen Sie den BedienController, bis das Menü SERVICE in der obersten Display-Zeile angezeigt wird.
In der obersten Menüzeile des rechten Displaybereiches werden die aufsummierten Betriebsstunden angezeigt.



Drücken Sie erneut die i-Taste, um zum Startbildschirm zurückzukehren.

Sollten bei Ihrem Therapiegerät die Betriebsstunden nicht wie beschrieben angezeigt werden, verfahren Sie bitte wie folgt:

3

Schalten Sie Ihr Atemtherapiegerät wie gewohnt ein.
Im Ausgangsbildschirm steht STARTSEITE in der obersten Zeile.



4

Halten Sie die Info- und Setup-Taste gleichzeitig für ca. 4 Sekunden gedrückt.



5

Das Menü SCHLAFQUALITÄT wird angezeigt.



Hinweis: Auf der linken Display-Seite sollten vier Symbole sichtbar sein. Werden weniger als vier Symbole angezeigt, wiederholen Sie bitte Schritt 4.

6

Drehen Sie den BedienController bis das Menü Schlafbericht wird angezeigt. Bestätigen Sie die Auswahl durch Drücken des BedienControllers (Symbol links wird orange hinterlegt).



7

Drehen Sie den BedienController bis in der Anzeige der Menüpunkt „Betr. Std.“ (Betriebsstunden) zu sehen ist.



8

Um auf die Startseite zurückzukehren, drehen Sie den BedienController bis der Menüpunkt STARTSEITE ausgewählt ist und bestätigen durch Drücken des BedienControllers.

Alternativ können Sie auch zweimal die „i“-Taste drücken.

