

## Betriebsstunden Prisma-smart/soft auslesen

### Voraussetzung

Das Gerät ist im Standby.

1. Menü-Taste  drücken.



2. Um das Info-Menü  aufzurufen die  drücken.
3. Mit den Tasten  oder  zum gewünschten Wert navigieren:

Anzeige	Bedeutung
0000 h	Gesamtbetriebsstunden des Gerätes.
1 d	Betriebsstunden für den letzten Tag.
7 d	Betriebsstunden für die letzten 7 Tage.
28 d	Betriebsstunden für die letzten 28 Tage.
182 d	Betriebsstunden für die letzten 182 Tage.
366 d	Betriebsstunden für die letzten 366 Tage.

- Die Daten werden nur dann angezeigt, wenn sie auch tatsächlich im Gerät vorliegen.
- Ein Therapietag beginnt und endet jeweils mittags um 12 Uhr. Daten, die von Mitternacht bis 12 Uhr aufgezeichnet werden, werden dem vorherigen Kalendertag zugeordnet.

Sollten Sie zum Ablesen der Gesamtnutzung / Therapiestunden noch Hilfe benötigen, erreichen Sie uns unter

Telefon: 089 / 81 88 81 00

Wir bedanken uns für Ihre Mitarbeit  
Ihre NRI Medizintechnik GmbH