

Ablesen der Betriebsstunden Dreamstation Variante 1 – „+“-Menü freigeschaltet

1. (B) Grundbildschirm
2. (A) Einmal nach RECHTS drehen auf
3. (A) Einmal nach RECHTS drehen auf



Meine Infos



Mein Betreuer

und durch einmal drücken (A) in das Menü gehen.

Therapiestunden	0.0
Gebläse	0.0.
Tage > 4	0
Compliance	65450
 Abfrage	

Es erscheinen „**Therapiestunden**“ und „**Gebläse**“. Sollte die Werte unterschiedlich groß sein (Abweichung größer als 100), geben Sie uns bitte beide Werte durch.

Ablesen der Betriebsstunden Dreamstation Variante 2 – „+“-Menü nicht freigeschaltet

1. (B) Grundbildschirm
2. (A) Einmal nach RECHTS drehen auf
3. Betriebsstunden ablesen




Meine Infos



Mein Betreuer

und durch einmal drücken (A) in das Menü gehen.

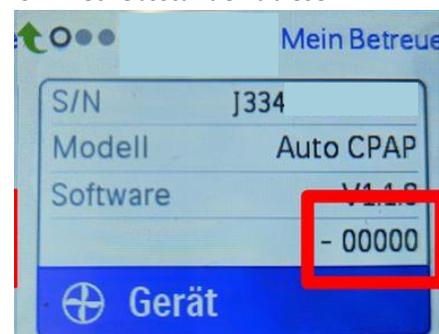

Die Betriebsstunden befinden sich auf der rechten Seite **zwischen** „**Software**“ und „**Gerät**“